

日医の 液晶視力計

2017年モデル

新しい健康診断
マニュアルに
対応



リモコン



4種類の自動判定機能

3/4判定 0.3開始

2/3判定 0.3開始

3/4判定 1.0開始

2/3判定 1.0開始

自動判定機能とは？

生徒の回答の正誤を自動判定し、ランドルト環(上下左右4方向)の向きと大きさが自動的に変わります。検査終了すると「A・B・C・D判定」が自動表示されます。

CHECK!

5 日医の液晶視力計 の特長

3

ランドルト環は、
見やすいセンター表示
です。

常に同じ場所に1つのランドルト環が表示されます。単独(字ひとつ)視力表と同じ表示になります。



1

自動検査機能と手動
検査機能が簡単に切
替えます。

手動検査では、ランドルト環8方向
0.1～2.0の検査ができます。

4

5mの位置決めスケール
が付属しています。

視力計をどこに移動しても直ぐに5
mの場所が分かります。

位置決めスケール
(5m)



2

バージョンアップ!

最大10台まで
並べて検査できます。

10周波の電波を利用します。並列し
て利用しても干渉し合いません。

5

リモコンは、
片手で操作可能な
スマート設計です。

リモコンの電源は単3アルカリ乾電
池2本です。



学校健康診断に
最適ね!



とってもスムーズ！

日医液晶視力計の 自動測定方法



このリモコンのおかげでスピーディな検査が行えるというわけ！


1

電源キーを押します。



2

自動/スタートキーを押します。

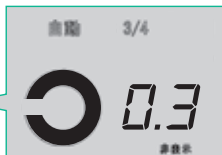

3

被検者の答えを聞き、3の4方向キー（上・下・左・右）を押します。

4


見えない場合は、4の「みえないキー」を押します。

5

自動で検査が進みますので、被検者の答えの通りに4方向キー又は「みえないキー」を押します。


6

検査終了後、リモコンもしくは本体画面に判定結果を表示します。

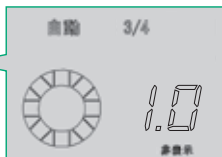

モード選択部
■自動検査時：「自動3/4」「自動2/3」表示
■手動検査時：「手動」表示

リモコン表示部

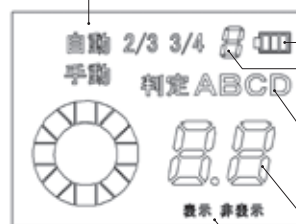

電池残量メータ部
リモコンチャンネル切換え部
判定部
■判定終了時に表示
■判定結果をA～Dで表示
視標レベル表示部
■0.1～2.0を表示

表示/非表示 切り換え用
■表示：判定結果を本体へ表示します
■非表示：判定結果を本体へ表示しません

液晶視力計2017年モデル(専用架台付)

一般医療 **送別** A

コード	価格	価格 改定
日医-21870	¥112,000 (税別)	

- 画面／7インチワイド、カラー液晶
- 測定距離／5m (5m測定紐付)
- 視標／ランドルト環4方向（自動モード時：0.3、0.7、1.0）
ランドルト環8方向（手動モード時：0.1～2.0）
（国際標準に準拠したランドルト環を使用）
- 判定結果表示／ABCD判定結果をリモコン液晶画面及び視力計本体に表示（表示・非表示選択可能）
- 電波10周波、最大10台同時使用
- 寸法（架台含む）／W400×D410×H1140～1750mm
- 重量／4.7kg（本体・架台）
- 電源／本体：AC100V 50/60Hz リモコン：単3アルカリ乾電池2本

※リモコン：内部電源機器電撃に対する保護の程度／B型機器

付属品／リモコン用シリコンカバー、防塵カバー
医療機器届出番号
23B2X00019000001

※2017年モデルについて
「日医保健・福祉カタログ
2017-2018」掲載の液晶視
力計（従来モデル）からの変
更点は右記の通りです。

	従来モデル	2017年モデル
価格(税別)	¥116,000	¥112,000
通信手段	赤外線	電波
同時使用	最大8台	最大10台

その他の仕様や外観、日医コードには、変更ありません。

自動測定で、保健室の先生以外も簡単に操作できます！

日医の液晶視力計は、操作が簡単な自動測定モードが付いているので、専門外の先生にも健診をお手伝いして頂けます。



株式会社 日本医療器研究所

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目24番11号
TEL.03(3834)3191(代表) FAX.03(3831)8964
URL: <http://www.nihon-iryouki.jp>

保健の日医

検索